

Akustika®

**... gut geschützt
und doch hören**

geben Sie Ihrem Ohr
die Vorsorge,
die es braucht



Akustika®

Wasserschutz

Inhalt: 12 Stück

SÜDMEDICA GMBH
Ehrwalder Straße 21
81377 München
Tel.: 089 / 714 40 61
Fax: 089 / 719 29 50

Printed in Germany

® = Registriertes Warenzeichen

A3/2/W1/6

AKUSTIKA[®] -Wasserschutz

hautfarben, wasserabweisend

Der ideale Ohrschutz beim Duschen, Schwimmen und Haarewaschen. Er verhindert das Eindringen von Wasser in den Gehörgang und dadurch das Auftreten von Beschwerden im Ohr. Bei Entzündungen im äußeren Gehörgang und Verletzungen des Trommelfells ist vor Gebrauch der Arzt oder Apotheker zu befragen.

Gebrauchsanweisung:

Das Wollebäuschchen an der Naht knicken und mit den Fingern durch Drehen einen Ohrstopfen formen. Bei kleinem Gehörgang kann das Wollbäuschchen an der Naht durchgeschnitten werden und es können zwei kleinere Ohrstopfen geformt werden. Je kompakter das Wollbäuschchen in den Gehörgang mit sanftem Druck eingedreht wird, um so besser wird der wasserabweisende Zustand erreicht.

Nach der Anwendung empfiehlt es sich, unter leichtem Zug am Ohrläppchen nach unten, den Ohrstopfen vorsichtig zu entnehmen. Diese Wasserschutzstopfen aus Wolle können bei Anwendung im Süßwasser nach vorsichtigem Trocknen 2 - 3 Mal wiederverwendet werden.