



# FUTURO™ RÜCKEN-BANDAGE

46815DABI, 46816DABI



**Unterstützende Polsterkissen helfen, schwache, schmerzende Muskeln zu entlasten.**

## IDEAL FÜR:

Walking, Aktivitäten mit geringer Belastung, Körperhaltung

## EIGENSCHAFTEN:

- 1 Mit unterstützenden Polsterkissen, um schwache, schmerzende Muskeln zu entlasten, ohne direkten Druck auf die Wirbelsäule auszuüben.
  - 2 Verstellbar für passgenauen Sitz und Unterstützung.
  - 3 Rückeneinsatz für gleichmäßige Druckverteilung.
- Schlankes, nicht voluminöses Design schränkt die Bewegung nicht ein.

## GRÖSSE:

Artikelnummer	Größe	PZN	CM
46815DABI	S/M	04536476	73.6-99.1
46816DABI	L/XL	01387863	99.1-127.0



ATMUNGSAKTIVES  
MATERIAL


Verwendungszweck: Hilft bei der Unterstützung eines steifen, verstauchten oder schmerzenden Rückens.

Zusammensetzung: Polyester, Nylon, Polyurethan, Faserplatten, Spandex, Acryl.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

## TRAGEANWEISUNG:

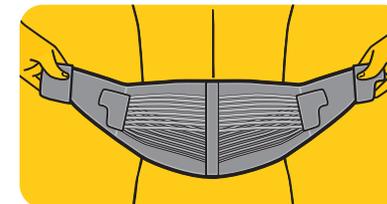

Öffnen Sie die Laschen der Hauptbandage und lösen Sie die Laschen der Gürtelbandage. Legen Sie die Bandage so um den Lendenbereich, dass sich die Pelotten an beiden Seiten der Wirbelsäule befinden und der gebogene Rand unten ist.



Legen Sie die Laschen der Hauptbandage um die Taille und schließen Sie den Klettverschluss vorn.



Ziehen Sie die Laschen der Gürtelbandage nach vorn und drücken Sie sie auf der Hauptbandage an. Regulieren Sie über die Position der Laschen an der Gürtelbandage den Sitz so, dass sich der für Sie richtige Stützeffekt ergibt.

3M Deutschland GmbH, Consumer Health Care  
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
www.futuro.de

