

## BODE X-Wipes

Universell einsetzbares Vliestuchspendersystem für flüssige HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittel.



### Anwendungsgebiete

Das universell einsetzbare Vliestuchsystem für die professionelle Reinigung und Desinfektion. Geeignet für alle flüssigen HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittel in Konzentrationen mit einer Einwirkzeit von 1 Stunde oder weniger (gem. VAH), z. B.:

- Für Arbeitsflächen
- Für patienten- und bewohnernahe Flächen
- Desinfektion von Rettungsfahrzeugen
- Überall dort, wo eine hygienische Aufbereitung von Mehrwegtüchern nicht möglich ist

### Produkteigenschaften

- Schützt Anwendungslösungen vor Kontamination und Verdunsten
- Sparsam im Verbrauch von Tüchern und Anwendungslösung
- Farbiges Entnahmesystem zur besseren Produktunterscheidung
- Reißfestes Vlies
- Stabiler Spender mit Tragegriff
- Lösung 28 Tage verwendbar

### Anwendung

Das BODE X-Wipes Spendersystem ist für den Einsatz mit flüssigen HARTMANN Flächen-Desinfektionsmitteln in Konzentrationen mit einer Einwirkzeit von einer Stunde oder kürzer (gem. VAH) geeignet. Der BODE X-Wipes Spender wird mit 2 Liter Anwendungslösung (bzw. 1,2 Liter bei der 40er Rolle oder mindestens 600 ml bei der 30er Rolle) des verwendeten HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittels befüllt. Bei der Herstellung der Anwendungslösungen sind die anwendungs- und sicherheitstechnischen Hinweise des jeweiligen Produktes und Einsatzkonzentrationen zu beachten.

### X-Wipes Vliestücher

Je nach Bedarf sind Vliesrollen mit einem Umfang von 90, 40 oder 30 Einzeltüchern erhältlich. Saugfähiges Polyestervlies (60 g/m<sup>2</sup>). Auch als BODE X-Wipes basic Vliesrolle verfügbar, die mit 40 g/m<sup>2</sup> eine leichtere Vliesqualität bietet (90 Einzeltücher).



### Dosierung

Entsprechend der eingesetzten Vliesrolle wird der Tuchspender mit 2 Liter Desinfektionsmittellösung (90er Rolle), 1,2 Liter (40er Rolle) oder 600 ml (30er Rolle in BODE X-Wipes Dose) befüllt.

### Kompatibilität

Das BODE X-Wipes Spendersystem kann mit folgenden HARTMANN-Desinfektionsmitteln benutzt werden:

- Mikrobac® forte
- Kohrsolin® FF
- Bacillo® AF
- Bacillo® 30 Sensitive Foam

### Standzeit

Bei ordnungsgemäßigem Verschluss verfügen die in BODE X-Wipes eingesetzten Flächen-Desinfektionsmittel von HARTMANN über eine Standzeit von 28 Tagen.

# BODE X-Wipes

## Zwei Möglichkeiten der Befüllung

### Befüllung des BODE X-Wipes Tuchspenders mit der BODE X-Wipes Vliesrolle im Folienbeutel



Ziehen Sie Handschuhe an.



Vliestuchrolle mit Folienbeutel in sauberen, trockenen Spender einsetzen.



Desinfektionslösung in den Folienbeutel geben, Vliestuchrolle gleichmäßig benetzen.



Vliestuch durch Entnahme-Rund führen. Erstes Vliestuch verwerfen.



Schrauben Sie den Deckel am Spender wieder zu. Etikett beschriften.



Folie zusammen mit Deckel entsorgen.

### Befüllung des BODE X-Wipes Tuchspenders mit der Standard BODE X-Wipes Vliesrolle



Ziehen Sie Handschuhe an.



Vliestuchrolle einsetzen.




Lösung von innen nach außen zugeben.



Vliestuch durch Entnahme-Rund führen und Spender sorgfältig verschließen. Erstes Vliestuch verwerfen.



Etikett beschriften.

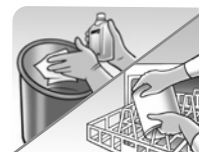

Spender vor der Wiederauffüllung manuell oder maschinell desinfizieren.

#### Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER

Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111

E-Mail: [science-center@hartmann.info](mailto:science-center@hartmann.info)



**Wir forschen für  
den Infektionsschutz**  
[hartmann-science-center.com](http://hartmann-science-center.com)

| Produktname                                                                              | Packungsinhalt | Artikelnummer | PZN      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| <b>BODE X-Wipes Spender für Vliesrolle im Folienbeutel, für 40er und 90er Vliesrolle</b> |                |               |          |
| 1 Spender Deckelverschluss blau                                                          |                | 981 370       | 10273940 |
| 1 Spender Deckelverschluss grün                                                          |                | 981 372       | 10273963 |
| 1 Spender Deckelverschluss rot                                                           |                | 981 371       | 10273957 |
| <b>BODE X-Wipes Vliesrolle 90 Tücher im Folienbeutel inkl. Deckelsystem</b>              |                |               |          |
| 90 Tücher Größe 200 x 300 mm                                                             |                | 981 946       | 19175914 |
| <b>BODE X-Wipes Vliesrolle</b>                                                           |                |               |          |
| 90 Tücher Größe 200 x 300 mm                                                             |                | 980 556       | 3538510  |
| 40 Tücher Größe 200 x 300 mm                                                             |                | 980 557       | 3538473  |
| 30 Tücher Größe 200 x 300 mm                                                             |                | 981 920       | 3539248  |
| <b>BODE X-Wipes basic</b>                                                                |                |               |          |
| 90 Tücher Größe 200 x 300 mm                                                             |                | 980 524       | 3538527  |
| <b>BODE X-Wipes Dose für 30er Rolle</b>                                                  |                |               |          |
| 1 Stück                                                                                  |                | 980 610       | 3539337  |
| <b>BODE X-Wipes Wandhalter</b>                                                           |                |               |          |
| 1 Stück                                                                                  |                | 980 583       | 3539219  |
| <b>BODE X-Wipes Sicherungsbügel</b>                                                      |                |               |          |
| 1 Stück                                                                                  |                | 980 584       | 3539225  |

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

*Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG  
Paul-Hartmann-Straße 12  
89522 Heidenheim  
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0  
Fax +49 (0) 7321-36-36  
[info@hartmann.info](mailto:info@hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)