

# Schutzpolster

## Carnation Schutzpolster

■ ***Ideal zur Drucklinderung und Linderung von der Reibung an der Ferse, an der Fußseite, der Fußoberseite und an den Zehen.***

- Weiche, flauschige Oberfläche.
- Elastisches Gewebe passt sich der Fußkontur an.
- Hypoallergen, selbsthaftend, für sensible Haut geeignet.
- Einfach anzuwenden und zuzuschneiden.

Personen mit Diabetes oder Kreislaufproblemen sollten vor der Anwendung professionelle Beratung suchen.

Teil des Carnation Fußpflegesortiments, professionell erforscht und entwickelt für die Fußpflege.

Kühl und trocken lagern.

## Anwendung

Linderung wird am besten erzielt, indem man das Polster auf der betroffenen Stelle anbringt.

1. Stellen Sie sicher, dass die Haut sauber und trocken ist.
2. Schneiden Sie das Polster in geeignete Größe.
3. Ziehen Sie das Schutzpapier ab und drücken Sie die Polstereinlage fest auf die Haut.
4. Wechseln Sie das Polster täglich, oder so oft wie nötig.

