

GEBRAUCHSANWEISUNG TULIPS BRUSTHÜTCHEN

Packungsinhalt:

Zwei Brusthütchen aus Silikon, Grösse M (20 mm) oder L (24 mm), eine Aufbewahrungsbox, Gebrauchsanweisung.

Indikation:

Die Tulips Brusthütchen eignen sich für den kurzfristigen Einsatz bei Saugproblemen und Wunden, empfindlichen Brustwarzen während des Stillens.

Anwendung:

1. Vor dem Gebrauch die Hände mit Wasser und Seife gründlich waschen.
2. Das Brusthütchen an der Auflagefläche mit etwas Muttermilch oder Wasser anfeuchten oder Lanolin Brustwarzencreme z.B. Ardo Gold Cream verwenden, damit es besser an der Brust haftet. Den Rand des Brusthütchens umschlagen. Das Brusthütchen zentriert auf die Brust setzen. Die Nase des Babys sollte bei der Aussparung liegen und berührt somit die Haut der Mutter (Bild 1).
3. Den Rand auf die Brust zurückklappen (Bild 2).

Hinweise:

Nur während des Stillens tragen, nach Gebrauch gemäss Anleitung reinigen. Häufiges Sterilisieren und Auskochen lässt das Material schneller altern. Bei Aufbewahrung der Brusthütchen in der Aufbewahrungsbox empfiehlt es sich, die Brusthütchen vorgängig trocknen zu lassen. Bei Anzeichen von Beschädigung die Brusthütchen nicht mehr verwenden. Brusthütchen und Zubehör für Kinder unreachbar aufbewahren. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte eine Fachperson.

Reinigung/Sterilisation:

Zu Hause: Die Brusthütchen vor dem ersten Gebrauch und danach einmal pro Tag zehn Minuten im Wasser auskochen. Nach jedem Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen, anschliessend gut abspülen und auf einem sauberen Tuch trocknen lassen. Brusthütchen und Aufbewahrungsbox sind für die Spülmaschine geeignet.

Im Klinikbereich: Brusthütchen: Sterilisation 121 °C = 20 Min. / 134 °C = 18 Min. und thermische Desinfektion 93 °C = 10 Min.
Aufbewahrungsbox: thermische Desinfektion 93 °C = 10 Min.

Entsorgung:

Unbedenklich, entsprechend den örtlich geltenden Vorschriften.