



## KINDER Nasen Spray Abschwellendes Spray

**Abtei KINDER Nasen Spray** wird angewendet zur Behandlung von Erkältung und (allergischem) Schnupfen. Für Kinder ab 2 Jahren.

**Abtei KINDER Nasen Spray** hilft bei verstopfter Nase dank der natürlichen osmotischen Wirkung des 100% hypertonen Meerwassers.

**Abtei KINDER Nasen Spray** ist ein natürlich wirksames, abschwellendes Nasenspray zur Linderung von Nasenbeschwerden bei Kindern ab 2 Jahren. Die unverdünnte Lösung bewahrt wichtige Mineralien und Spurenelemente, die im Meerwasser enthalten sind und befreit die Nase. Durch den osmotischen Effekt schwillt die Nasenschleimhaut ab und das Atmen wird erleichtert.

**Abtei KINDER Nasen Spray** trägt zur Beseitigung von Infektionserregern und Allergenen im Nasensekret bei (durch Drainage-Effekt). Der 3 in 1 Effekt lindert:

1. Verstopfte Nase
2. Laufende Nase
3. Niesen

### **Abtei KINDER Nasen Spray**

- ist gut verträglich
- befreit die Nase
- erleichtert das Atmen\*
- hilft Kindern besser zu schlafen\*

- ✓ 100% natürliches Meerwasser
- ✓ Gut verträglich
- ✓ Sanft zur Nasenschleimhaut
- ✓ Ohne Gewöhn-Effekt
- ✓ Ohne Konservierungsstoffe

### **Zusammensetzung:**

100% Maris Aqua  
100% natürliches, unverdünntes und hypertones Meerwasser (entspricht 22 g/L Gesamtmineral-salzen)

### **Anwendung**


Je nach Bedarf bis zu 6-mal täglich je ein Sprühstoß in jedes Nasenloch. Bei Bedarf ist eine regelmäßige Anwendung möglich. Geeignet für längeren Gebrauch.

\* während einer Erkältung

### **Art der Anwendung**

Kinder sollten das Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

1. Putzen Sie sich die Nase.
2. Entfernen Sie die Schutzkappe.
3. Vor dem ersten Gebrauch einige Male pumpen, bis die Lösung austritt.
4. Bei aufrechter Haltung in jedes Nasenloch sprühen und vorsichtig durch die Nase atmen.
5. Lassen Sie das Produkt für einige Minuten einwirken, bevor Sie sich die Nase putzen.
6. Reinigen Sie die Sprühdüse nach jedem Gebrauch und stecken Sie die Schutzkappe wieder auf die Sprühdüse.
7. An einem trockenen Ort und in der Originalverpackung aufbewahren.

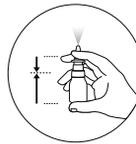

Ein Produkt pro Person verwenden, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.

Die maximale Anwendungsdauer wird für Erkältungen, Schnupfen und damit einhergehend verstopfter Nase auf 10 Tage geschätzt. Bei anhaltenden nasalen Beschwerden konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Bei Zimmertemperatur verwenden.



Nicht über 30 °C lagern

Innerhalb von 6 Monaten nach dem ersten Sprühstoß aufbrauchen.

Nicht nach dem auf der Verpackung aufgedruckten Verfallsdatum verwenden.

Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern halten.

Nicht verwenden, wenn das Produkt kaputt oder beschädigt ist.

Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie das Produkt nach einer Nasenoperation oder -verletzung anwenden.

Die Verwendung durch mehr als eine Person kann Infektionen verbreiten.

Die folgenden Nebenwirkungen wurden beschrieben:

- Seltene Fälle von vorübergehender nasaler Reaktion (< 0,001%)
- Seltene Fälle von Epistaxis, Übelkeit, Kopfschmerzen (< 0,0001%)

Wenn ein Symptom/eine Nebenwirkung auftritt, beenden Sie die Anwendung. Suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn die Nebenwirkung anhält.

Schwerwiegende Zwischenfälle müssen dem Laboratoire de la Mer und der zuständigen Behörde vor Ort gemeldet werden.

## Medizinprodukt



Europäische Konformität und Identifizierung der benannten Stelle



Gebrauchsanweisung vor Anwendung beachten.



Steril durch Verwendung aseptischer Techniken



Einzelnes Sterilbarrieresystem



Achtung, lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung



Chargenbezeichnung



Datum nach dem das Produkt nicht mehr verwendet werden darf



Herstellungsdatum



Legaler Hersteller



Defektes oder beschädigtes Produkt nicht verwenden.



Recyclbarer Karton



Recyclbares Papier



Faltschachtel recyclebar



Verpackungen und anderen Abfall umweltschonend in dafür vorgesehenen Abfallbehältnissen entsorgen.

Nasenspray

20 mL

[www.abtei.de](http://www.abtei.de)

MT Version: V02

Datum der LAT Erstellung: 2024-02



Laboratoire de la Mer  
Av. du Général Patton  
ZAC de la Madeleine  
35400 Saint-Malo  
France

Vertreiber in DE/AT:  
Perrigo Deutschland GmbH  
Königstraße 26  
DE-70173 Stuttgart