



NEU
TENA Bariatric
Sortiment

Würde

Für eine würdevolle und komfortable
Versorgung adipöser Menschen



Das TENA Bariatric Sortiment
Together we make a difference



Starkes Übergewicht – eine wachsende Herausforderung für die Kontinenzversorgung

Starkes Übergewicht macht die Pflege von Betroffenen schwieriger:



Übermäßiges Körpergewicht kann die **Blasenkontrolle** beeinträchtigen.




Klinisch übergewichtige Menschen neigen eher zu **Hautproblemen**.²



Unzureichende Kontinenzpflegeprodukte führen oft zu **Ausläufen** und **häufigeren Produktwechseln**, die die Würde beeinträchtigen.

1 von 6
Menschen ist adipös¹

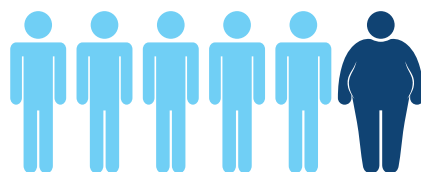

BMI ≥ 30

Bedürfnisse ändern sich. TENA entwickelt weiter.

Das neue TENA Bariatric Sortiment

Speziell auf die Bedürfnisse adipöser Verwender zugeschnitten, hilft Ihnen das neue TENA Bariatric Sortiment bei einer individuellen und optimalen Pflege.



- **Größere Größen und bessere Passform** für mehr Komfort und Sicherheit



- **Atmungsaktive Materialien** für eine verbesserte Hautgesundheit

- **Odour Control™** für ein frisches Gefühl



- **Hautpflegeprodukte** ohne Wasser und Seife für eine bequeme und effiziente Reinigung

- **Schutzcremes** für den empfindlichen Intimbereich



¹ 18 Jahre oder älter, in der EU lebend, 2014.

Ausgewählte TENA Hautpflege – Produkte für eine gesunde Haut

Feuchtigkeit verhindern und Atmungsaktivität verbessern – das sind die Schlüssel für eine gesunde Haut bei übergewichtigen Betroffenen. Auch die Anfälligkeit für Hautschäden wird dadurch reduziert.³

Ganzkörperreinigung

Für die Ganzkörperreinigung im Bett oder in ähnlichen Situationen:
Diese TENA Produkte helfen, Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu pflegen.



TENA Wet Wash Glove

Weiche, mit Reinigungs- und Pflege-lotion versehene Waschhandschuhe für die tägliche Ganzkörperreinigung



TENA Shampoo Cap

Einweg-Waschhaube mit Shampoo und Conditioner für Haarwäsche im Bett

Pflege des Intimbereichs

Zur schonenden Reinigung, Pflege und zum Schutz der empfindlichen Intimhaut bei häufigen Kontinenzpflegeroutinen



TENA Wet Wipe

Vorbefeuchtetes 3-in-1-Pflegetuch



TENA Barrier Cream

Zur vorbeugenden Pflege, wenn der Intimbereich frühe Anzeichen von Rötung oder Irritation zeigt



TENA Wash Cream

Vorbeugende Hautreinigung und -pflege

Die neue TENA Slip Bariatric Super für mehr Komfort und Sicherheit

Einzigartige Vorteile speziell für stark übergewichtige Betroffene

Erhältlich in

XXL 163-178 cm Umfang
3XL 175-244 cm Umfang

100 % atmungsaktiv

dermatologisch
getestetes Material
mit ConfioAir™

ConfioAir™

Mit Odour Control™

für ein Gefühl von
Frische und Würde

92%

stimmen zu, dass
das Produkt* die Haut
trocken hält

**Elastische Seitenteile
und wiederverschließ-
bare Klettverschlüsse**

für einfache Handhabung
und bequeme Passform



Anlegetechnik TENA Slip Bariatric Super



1. Legen Sie die längsgefaltete
Schutzhose von vorne nach
hinten zwischen den Beinen
hindurch an



2. Ziehen Sie die Vorderseite
der Schutzhose mit Zick-
zack-Bewegungen an




3. Fixieren Sie erst nachein-
ander die beiden unteren
Klettverschlüsse, und dann
die oberen Verschlüsse.
Die Klettverschlüsse kön-
nen wiederholt befestigt
und angepasst werden


TENA Comfort Ultima + TENA Fix Bariatric



1. Legen Sie die Vorlage von
vorne nach hinten zwischen
die Beine, falten Sie die
Vorlage der Länge nach,
so dass eine Schalenform
entsteht

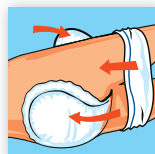

2. Vorlage von vorne nach
hinten positionieren.
Sicherstellen, dass sich
die Hautfalten der Ober-
schenkel außerhalb der
Vorlage befinden

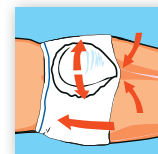

3. Fixierhose hochziehen und
die Beinlastik im Schritt-
bereich anpassen, jedoch
nicht in den Schrittbereich
„hineinziehen“

* TENA Slip Stretch Medium und Large

TENA Comfort Ultima – die bewährte Lösung in der Kontinenzpflege

Die klassische Vorlage jetzt noch größer erhältlich

Mit Odour Control

für ein Gefühl von Frische und Würde

Seitenauslaufschutz

speziell entwickelt für zusätzlichen Schutz

ConfioAir™

Extra Größe

73,5 cm lang
24,5 cm breit

100 % atmungsaktiv

dermatologisch
getestetes Material
mit ConfioAir™

Hoch absorbierender Saugkern mit FeelDry™

für Sicherheit
und Diskretion



Kombiniert

mit TENA Fix Bariatric in besonders großen Größen

Namensschilder

zur Zuordnung
der Bewohner

Atmungsaktives Gewebe

und bequemes
Design ohne Nähte

Erhältlich in

4XL 140-200 cm Umfang
5XL 160-230 cm Umfang

Hoch elastisch

hält das TENA Produkt
sicher an Ort und Stelle



Mit TENA gewinnen Sie mehr Zeit für eine bereichernde Pflege

Das komplette TENA Bariatric Sortiment:

Für eine würdevolle und komfortable Versorgung adipöser Verwender.



Produkt	TENA Slip Bariatric Super XXL	TENA Slip Bariatric Super 3XL	TENA Comfort Ultima	TENA Fix Bariatric 4XL	TENA Fix Bariatric 5XL
Saugstärke					
Umfang	163-178 cm	175-244 cm	73,5 cm (Länge)	140-200 cm	160-230 cm
Artikelnummer	61 49 0	61 39 1	75 92 05	75 40 67	75 40 68
VE/AE*	64/32	32/8	68/17	100/5	100/5
HVz.-Nr.	–	–	beantragt	beantragt	beantragt



Produkt	TENA Wet Wash Glove	TENA Shampoo Cap	TENA Wash Cream, 500 ml*	TENA Wet Wipe	TENA Barrier Cream
Körperbereich	Ganzer Körper	Haare	Intimbereich	Intimbereich	Intimbereich
Anwenden für	Tägliche Körperreinigung	Haarwäsche im Bett	Tägliche Körperreinigung	Nach Produktwechsel	Bei ersten Anzeichen von Reizungen
Artikelnummer	1116 (milder Duft) 1158 (parfümfrei)	1042	4242	6479	4419
VE/AE*	240/8	30/1	10/1	576/48	10/1

* VE=Versandseinheit, AE= Abgabereinheit. ** Weitere Abgabegrößen erhältlich.

Bestellen Sie jetzt kostenlose Muster des TENA Bariatric Sortiments:
TENA Hotline 0180 6 / 12 12 21

Festnetz max. 0,20 €/Anruf, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf.
Anrufe sind nur aus Deutschland möglich.

Essity Germany GmbH · Sandhofer Str. 176 · 68305 Mannheim

1. Adipositas ist definiert als ein BMI von 30 oder mehr. Fast 1 von 6 Erwachsenen in der EU gilt als fettleibig. European Health Interview Survey. eurostat newsrelease October 2016. 2. Gallagher S, et al. Preplanning with protocols for skin and wound care in obese patients. Adv Skin Wound Care 2004 Oct;17(8):436-441; quiz 442-443. 3. Lichtenfeld A, et al. Evidence-Based Skin Care: A Systematic Literature Review and the Development of a Basic Skin Care Algorithm. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2015; 42(5): 501-524.

